


Schéma d'implantation

PG 8591 – PG 8593

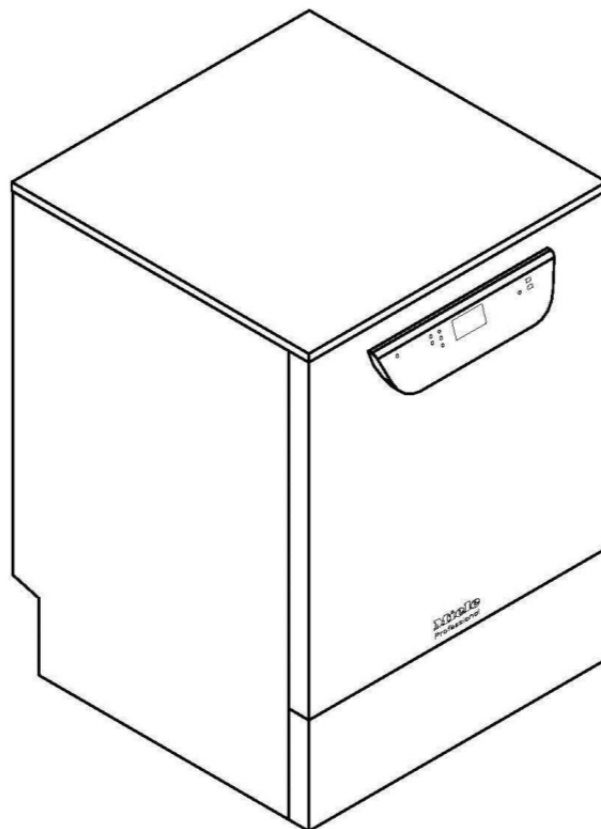

Numéro matériel
Révision

/ Version

10 076 230
00

FR, BE, CH

Caractéristiques techniques

Miele
PROFESSIONAL

Laveur-désinfecteur

PG 8591 - 8593






Légende :

(EL) Les symboles entourés en gras signifient :
Raccordement nécessaire

(DS) Les symboles entourés par des pointillés signifient :
Raccordement optionnel ou nécessaire en fonction du modèle
d'appareil

FR, CH				
(EL)	Branchement électrique	Tension (à la livraison)	V/Hz	3 N AC 400/50
		Puissance de raccordement	kW	9,3
		Fusible	A	3 x 16
		Câble d'alimentation, section minimum	mm ²	4 x 2,5
		Longueur du câble de raccordement (H05(07)RN-F) avec fiche CEE	m	2,0
(EL)	Branchement électrique	Tension (commutable)	V/Hz	AC 230 V/50
		Puissance de raccordement	kW	6,3
		Fusible	A	1 x 30 – 32
		Câble d'alimentation, section minimum	mm ²	3 x 4
		Longueur du câble d'alimentation (H05(07)RN-F) sans fiche	m	2,0
(EL)	Branchement électrique	Tension (commutable)	V/Hz	AC 230 V/50
		Puissance de raccordement	kW	3,3
		Fusible	A	1 x 15 /16
		Câble d'alimentation, section minimum	mm ²	3 x 1,5
		Longueur du câble d'alimentation (H05(07)RN-F) sans fiche	m	2,0
BE				
(EL)	Branchement électrique	Tension (à la livraison)	V/Hz	3 AC 230 V/50
		Puissance de raccordement	kW	7,5
		Fusible	A	3 x 20
		Câble d'alimentation, section minimum	mm ²	4 x 2,5
		Longueur du câble d'alimentation (H05(07)RN-F) sans fiche	m	1,6
(EL)	Branchement électrique	Tension (commutable)	V/Hz	AC 230 V/50
		Puissance de raccordement	kW	3,3
		Fusible	A	1 x 16
		Câble d'alimentation, section minimum	mm ²	3 x 1,5
		Longueur du câble d'alimentation (H05(07)RN-F) sans fiche	m	2,0

		<p>Il est conseillé de raccorder le laveur-désinfecteur avec une prise conforme afin de pouvoir effectuer facilement les contrôles de sécurité électriques. La prise doit être accessible une fois l'installation réalisée. En cas de raccordement fixe du laveur-désinfecteur, il faut prévoir un interrupteur principal équipé d'un dispositif de disjonction phases et neutre et une ouverture de contact d'au moins 3 mm. Pour améliorer la sécurité il est vivement conseillé d'installer un interrupteur de protection contre les courants de court-circuit en amont. Conformément aux prescriptions internationales, une liaison équipotentielle avec une bonne liaison des contacts doit être établie.</p> <p>Classe de protection IP21</p>		
(PA)	Liaison équipotentielle et terre	<p>Pour effectuer le branchement d'une liaison équipotentielle, une vis de branchement est disponible à l'arrière du laveur-désinfecteur.</p> <p>La liaison équipotentielle et la terre doivent être raccordées !</p>		
(NW)	Raccordement réseau/ imprimante (option)	<p>Interfaces côté machine en option pour le transfert ou l'impression de données de cycle.</p> <p>Modules de communication (non fournis) :</p> <p>Module Ethernet ou module RS232 (Installer si nécessaire des prises au niveau de l'appareil.)</p> <p>Les raccordements/installations doivent être effectués conformément à IEC 60950.</p>		

	Eau froide	Deux raccordements à l'eau froide sont nécessaires pour les variantes de machines avec condensateur vapeur (DK). Le cas échéant, raccorder le deuxième tuyau d'eau froide avec l'élément en "Y" joint.				
		Température max.	°C	20		
		Dureté de l'eau max. admissible	mmol/l	12,6		
			°dH	70		
		Pression minimale	kPa	200		
		Pression minimale lors d'une entrée d'eau prolongée	kPa	100		
		Pression maximale	kPa	1 000		
		Débit volumétrique	l/min	7,5		
		Raccord fileté à prévoir par l'exploitant selon DIN 44 991 (joint plat)	pouce	3/4" filetage extérieur		
		Longueur tuyau de raccordement eau froide	m	env. 1,7		
Longueur du tuyau de raccordement du condensateur vapeur	m	env. 1,7				
Un raccordement direct est autorisé sans robinets de sécurité.						
	Eau chaude	Température max.	°C	65		
		Dureté de l'eau max. admissible	mmol/l	12,6		
			°dH	70		
		Pression minimale	kPa	200		
		Pression minimale lors d'une entrée d'eau prolongée	kPa	40		
		Pression maximale	kPa	1 000		
		Débit volumétrique	l/min	7,5		
		Raccord fileté à prévoir par l'exploitant selon DIN 44 991 (joint plat)	pouce	3/4" filetage extérieur		
		Longueur tuyau de raccordement eau chaude	m	env. 1,7		
		Un raccordement direct est autorisé sans robinets de sécurité.				
	Eau déminéralisée	Température max.	°C	65		
		Pression minimale	kPa	200		
		Pression minimale lors d'une entrée d'eau prolongée	kPa	30		
		Pression maximale	kPa	1 000		
		Débit volumétrique	l/min	7,5		
		Raccord fileté à prévoir par l'exploitant selon DIN 44 991 (joint plat)	pouce	3/4" filetage extérieur		
		Longueur tuyau de raccordement eau déminéralisée	m	env. 1,7		
		Un raccordement direct est autorisé sans robinets de sécurité.				
	Vidange	Température de l'eau de vidange	°C	93		
		Longueur du tuyau de vidange	m	env. 1,4		
		Longueur max. de la rallonge du tuyau de vidange	m	env. 4,0		
		Hauteur de refoulement de la pompe de vidange à partir du rebord inférieur de l'appareil (max.)	m	1,0		
		Débit volumétrique temporaire max. de la vidange	l/min	16		
		Obturateur à prévoir par l'utilisateur par tuyau de vidange (da x l)	mm	22 x 30		
		Il est conseillé de guider dans la vidange, le tuyau de vidange dans un coude de 600 mm min. au-dessus du bord supérieur du sol fini.				
	Dosage externe (en option) (Respecter le modèle de l'appareil)	Raccordement jusqu'à deux dispositifs de dosage pour produits liquides sur la paroi arrière.				

	Socle	Hauteur réglable	mm	-0/+60
		Diamètre du socle	mm	35
		Emplacement pour les pieds de l'appareil	M	8
	Emission de chaleur dans la pièce d'installation	Emission de chaleur par rayonnement	kWh/h	0,35
		Emission de chaleur par produit de rinçage lors de prélèvement	kWh/h	0,40
	Caractéristiques	Hauteur d'encastrement	mm	820
		Hauteur avec couvercle	mm	835
		Largeur	mm	598
		Profondeur	mm	598
		Hauteur de la porte	mm	622
		Poids net	kg	78
		Charge au sol en fonctionnement	N	1 200
		Largeur de chargement minimale de l'appareil avec palette de transport	mm	670
		Profondeur de chargement minimale de l'appareil avec palette de transport	mm	740
		Hauteur de chargement minimale de l'appareil avec palette de transport	mm	920
	Conditions d'installation	Température ambiante admissible	°C	5-40
		Humidité relative de l'air max.	%	80
		Hauteur d'installation max. au-dessus du niveau de la mer (NN)	m	1 500
<p>Respectez impérativement les instructions de montage lors de l'installation du laveur-désinfecteur.</p> <p>Il est conseillé de n'installer que des meubles pour applications professionnelles à proximité du laveur-désinfecteur afin d'éviter tout risque de dommage causé par la condensation.</p> <p>L'installation doit exclusivement être effectuée par des installateurs agréés, conformément aux prescriptions et aux règlements et aux règlements de prévention des accidents en vigueur.</p> <p>Sous réserve de modifications ! Dimensions en mm.</p>				

